


Oldenburger Kinder-Reimtest (olki)

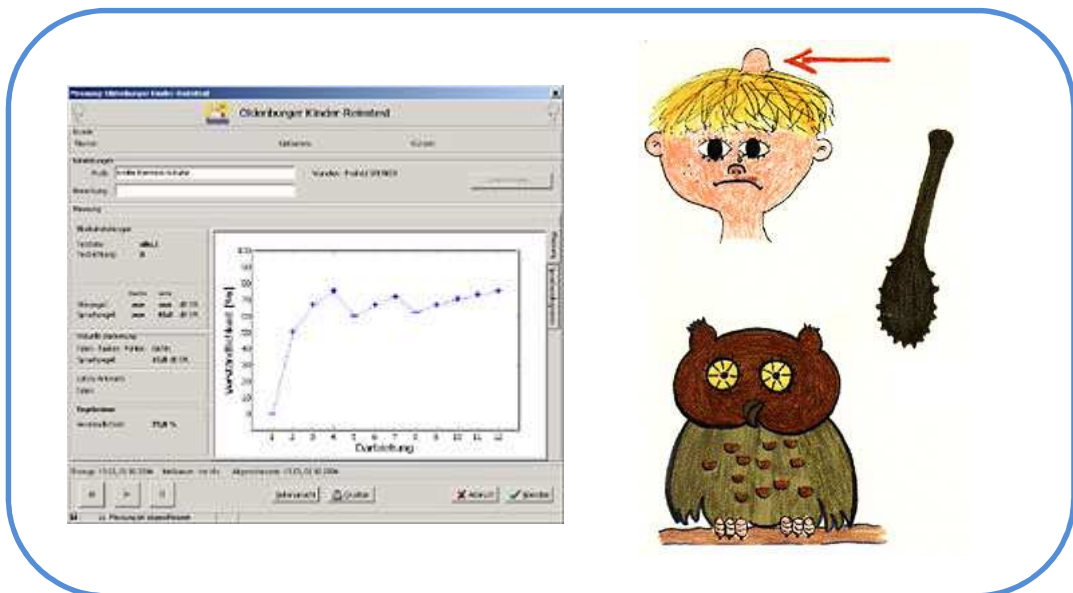

- Die Software "Oldenburger Kinder-Reimtest" ist als Messmodul für die "Oldenburger Messprogramme" erhältlich.
- Der Test ist als Modul in den Audiometern AT900, AT960, AT700 und ear 2.0 erhältlich.
- Die Überprüfung der Fähigkeit, Sprache zu verstehen, ist ein wesentlicher Faktor für die Beurteilung kindlicher Hörstörungen. Da besonders bei schwerhörigen Kindern von unterschiedlichen Sprachentwicklungsständen ausgegangen werden muss, werden Testverfahren benötigt, die die Sprachverständlichkeit in unterschiedlichen Wortkombinationen und Schwierigkeitsgraden ermitteln.
- Der an der Universität Oldenburg entwickelte Kinder-Reimtest erweitert hierfür das verfügbare Instrumentarium der audiologischen Diagnostik. Der Reimtest benutzt ein geschlossenes Antwortformat und ein Wortmaterial, das sich phonologisch der deutschen Sprache weitgehend angleicht. Der Wortschatz ist kindgemäß und besteht aus zweisilbigen Wörtern. Diese Wortstruktur tritt im Deutschen am häufigsten auf.
- Jeweils drei ähnlich klingende (reimende) Begriffe sind in einer (Bild-)Gruppe zusammengestellt. In der sprachaudiometrischen Praxis bei schwerhörigen Kindern stellen Artikulationsschwierigkeiten häufig ein Problem bei der Erfassung der Antworten der Kinder dar. Die Begriffe des Oldenburger Kinder-Reimtests werden deshalb durch ein kindgerechtes, farbiges Bildmaterial mit hohem Aufforderungscharakter repräsentiert.
- Die drei möglichen Antwortalternativen werden jeweils auf einer Bildtafel veranschaulicht. Die Kinder geben durch Zeigen auf eine der drei Darstellungen nach dem Ankündigungssatz "Bitte zeige das Bild ..." an, welches Wort sie verstanden haben (die Angabe "nicht verstanden" ist ebenfalls möglich).
- Bei der Software-Version des Oldenburger Kinder-Reimtest werden die Bilder automatisch auf einem Computer-Monitor angezeigt.

Oldenburger Kinder-Reimtest (olki)

Das Kind kann der betreuenden Aufsichtsperson die Antwort mithilfe der originalen Bildtafeln oder mithilfe der Computerdarstellung geben.

Die Eignung des Wortmaterials und der Bilder für schwerhörige Kinder wurde sowohl mit schwerhörigen als auch mit normalhörigen Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Grundschulen überprüft.

So wurden 10 Testreihen mit jeweils 12 Wörtern gebildet, die phonologisch und audiologisch äquivalent sind. Mit einer Proberihe von etwa 6 Wörtern sollte vorweg die Eignung des Tests für die Kinder überprüft werden. Sie bereitet diese zudem auf die Aufgabenstellung vor. Der Oldenburger Kinder-Reimtest ist aus gegenwärtiger Sicht primär geeignet, Sprachverständlichkeits-messungen bei Kindern und Jugendlichen von der 1. bis zur 4. Klasse durchzuführen (das Kind muss jeweils vom Spracherwerb bzw. vom Verständnis her mit dem Testwörterinventar vertraut sein, dies sollte bei jüngeren Kindern vorab getestet werden). Der Test ist für schwerhörige Kinder und für Träger von Cochlea Implantaten geeignet.



Technische Daten

Die Software "Oldenburger Kinder-Reimtest" beinhaltet folgende Merkmale:

- 10 Testlisten mit je 12 Wörtern
- 120 Bilder zum Anklicken der Antwort (Software-Version der Original Bildtafeln)
- Messung in Ruhe, optional auch im Störgeräusch
- Alle mitgelieferten Audiosignale werden auf die Festplatte kopiert und digital abgespielt. Die mitgelieferten Audiosignale sind nicht für andere Zwecke verwendbar.

Oldenburger Kinder-Reimtest (olki)

Software

Der olki erweitert das Instrumentarium der audiologischen Diagnostik speziell für Kinder ab der 1. Grundschulklasse.

Der Wortschatz dieses Reimtests ist kindgerecht und besteht aus 10 Testlisten mit jeweils 12 dargebotenen, zweisilbigen Wörtern. Jede Testliste ist phonologisch und audiologisch äquivalent, d.h. gleich verständlich. Zu jedem Wort einer Testliste gibt es eine Gruppe von insgesamt 3 ähnlich lautenden (reimenden) Wörtern, die sich entweder im konsonantischen Anlautteil (z.B. "Beule - Keule - Eule"), im konsonantischen Inlautteil (z.B. "Tanne - Tasse - Tasche") oder im vokalischen Inlautteil (z.B. "Brote - brüte - brate") unterscheiden und die jeweils als Antwortalternativen angeboten werden.

Zur Motivation und zur Vermeidung von Problemen durch Artikulations-schwierigkeiten z.B. bei schwerhörigen Kindern werden die drei möglichen Antwortalternativen jeweils auf einer kindgerechten Farbtafel bildlich dargestellt.

Die Kinder geben durch Zeigen auf eine der drei Darstellungen an, welches Wort sie verstanden haben (die Angabe "gar nicht verstanden" ist möglich). Eine Probemessung ist möglich und sollte mit dem Kind durchgeführt werden, um das Kind auf die Aufgabenstellung vorzubereiten und um die generelle Eignung zu prüfen, d.h. ob dem Kind die Begriffe bekannt sind (insbesondere bei sehr jungen Kindern).



Technische Daten

Im Lieferumfang der manuellen Fassung enthalten ist 1 Audio CD sowie 1 Aktenordner mit Kurzbeschreibung, Handbuch, allen erforderlichen Messformularen und 120 farbigen Bildtafeln.